

# Laboratorio TRILAB



✉ trilab@trilab.com.ar

📍 Presidente José Evaristo Uriburu 774 -2° PISO - CABA

☎ 011 7532 2183 / 011 4951 2448

📞 +54 9 11 2736 1516

## ANTICUERPO ANTI AQP4 (Aquaporin-4).

### Instrucción para el Paciente:

- Ayuno de 8 horas.

### Instrucción para la toma de muestra:

#### En suero:

- Extraer 10 ml de sangre venosa y colocar 2 en tubos secos.
- Evitar punciones traumáticas que puedan causar hemólisis.
- Dejar reposar al menos 15 minutos para que coagule.
- Centrifugar por 15 min a 2500 rpm.
- Volumen mínimo a remitir: 3 ml de suero.

### Condiciones de almacenamiento para la derivación de la muestra:

- Rotular la muestra
- Conservar refrigerada (no congelar) para su envío dentro de los 15 días.
- Condiciones de envío: conservar refrigerada en nevera de telgopor con geles fríos. Evitar el contacto directo con los geles.

### Recomendaciones:

Con el objetivo de poder repetir este u otro estudio y debido a que la muestra tomada podría referir a una muestra previa al inicio de tratamientos y por lo tanto única, se sugiere conservar un stock extra de la muestra de suero de al menos 3 ml.

Para la conservación de esta muestra es aconsejable refrigerar a -80 °C, -40°C, ó -20°C (en este orden de prioridad), de acuerdo a la disponibilidad de la institución.