



CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

(0341) 486 1600

NUEVE

9 de Julio 2851, Rosario, Santa Fe

CMF (HPN)

INDICACIONES AL PACIENTE

- Ayuno 4 h

INDICACIONES DE LA MUESTRA

- Cantidad mínima 2 ml de muestra.
- Tomar sangre venosa.
- Colocar en 2 tubos de tapa lila (tubos con anticoagulante EDTA).
Respetar la proporción (1:9), es decir, 1 vol. De EDTA y 9 vol. De sangre, por lo general los tubos indican el volumen máximo de sangre con el que pueden ser cargados para mantener la proporción. Realice la maniobra de invertir el tubo para lograr la disolución del anticoagulante en la muestra.
- Mantener enseguida la sangre entera- sin centrifugar- refrigerada a 4°C (heladera). Derivar la muestra a 4°C (sin cortar la cadena de frío) dentro de las 48 hs, evitando el contacto directo de la muestra con el refrigerante.
- Rotular el tubo con iniciales y fecha de nacimiento del paciente.

Tenga en cuenta que la muestra debe llegar al laboratorio dentro de las 48 hs de extracción para que sea viable su procesamiento, por lo que recomendamos gestionar la extracción de sangre y el retiro de la muestra de lunes a miércoles.