

Laboratorio TRILAB



✉ trilab@trilab.com.ar

📍 Presidente José Evaristo Uriburu 774 -2° PISO - CABA

☎ 011 7532 2183 / 011 4951 2448

📞 +54 9 11 2736 1516

FOSFATASA ALCALINA (FAL).

Instrucción para el Paciente:

- Ayuno de 8 horas.

Instrucción para la toma de muestra:

- Extraer 1 tubo seco de 5ml con sangre venosa. Evitar punciones traumáticas que puedan causar hemólisis.
- Dejar reposar al menos 15 minutos para que coagule.
- Centrifugar por 15 min a 2500 rpm.
- Volumen mínimo a remitir: 1 ml de suero.
- Enviar muestra correctamente rotulada.
- Condiciones de almacenamiento: conservar congelada a -20°C .
- Condiciones de envío: conservar congelada.