

Vitamina B6 (Piridoxal Fosfato).

Instrucción para el Paciente:

- Ayuno de 12 horas.

Instrucción para la toma de muestra:

En suero:

- Extraer 5ml de sangre venosa en 1 tubo seco.
- Evitar punciones traumáticas que puedan causar hemólisis.
- Dejar reposar al menos 15 minutos para que coagule.
- Centrifugar por 15 min a 2500 rpm.
- Volumen mínimo a remitir: 1 ml de suero.

En plasma:

- Extraer sangre venosa en 2 tubos con anticoagulante heparina, citrato de sodio o EDTA.
- Evitar punciones traumáticas que puedan causar hemólisis.
- Garantizar el enrase correcto.
- Invertir suavemente al menos 5 veces evitando la formación de espuma.
- Centrifugar por 15 min a 2500 rpm.
- Volumen mínimo a remitir: 1 ml de plasma.

Condiciones de almacenamiento:

- Trasvasar a tubo de plástico correctamente rotulado.
- Conservar protegido de la luz.
- Conservar congelada (-20 °C).

Condiciones de envío:

- Conservar congelada.